



1. Cihaz üzerinde yer alan SD kartı çıkartıp bilgisayarınıza takın.



2. İndirmiş olduğunuz klasörde yer alan “SC3MB.bin” isimli dosyayı SD kartınızın içerisine atın.

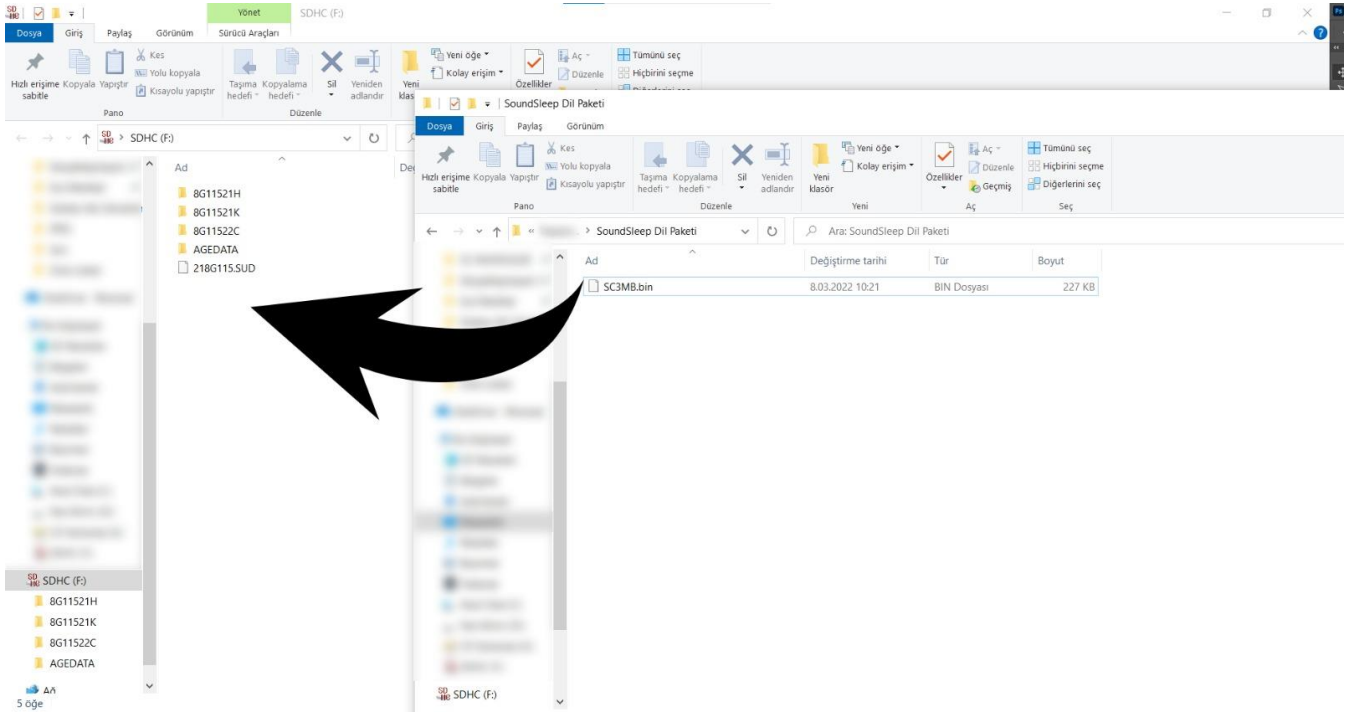

3. Güç kablosu takılı değilken SD kartınızı tekrar cihaza yerleştirin.

4. Cihazınızın Rampa tuşuna () basılı tutarak güç kablosunu takın.



5. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır. İşlem tamamlanana kadar bekleyiniz. (İşlem başladığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)



6. Güncellemenin tamamlanmasının ardından cihazınızı normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. (İşlem tamamlandığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

