


ACARE CPAP SİLİKONLU BURUN MASKESİ

Model:
RAP-311Small-(Küçük-Boy)
RAP-312Medium-(Orta-Boy)
RAP-313Large-(Büyük-Boy)

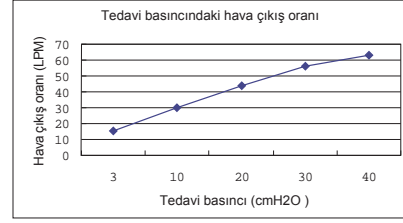

Kullanım Amacı

CPAP /VPAP maskesi , doktorlar tarafından önerilen CPAP/VPAP tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış bir üründür.Hastanelerde veya evlerde bulunan sürekli pozitif hava basıncı sağlayan CPAP/VPAP cihazlarla birlikte kullanılmaktadır.

Özellikler

- *Küçük ,hafif,konforlu ve tek kalıp halinde silikon
- *Şeffaf maske, ağız ve burun bölgeleri kolay görünmesini sağlar.
- *Küçük CO2 birikintileri için küçük bir çıkış boşluğu mevcuttur.
- *Maske ve 22mm'lik hortum bağlantıları üzerinde 360°dereceye dönmesini sağlayan mekanizma.
- *Velkrolu bağlama kemeri esnekliği ve hareket etme olanağı sağlar.

Yıkama Talimatları

Bağlama kemeri maskeden ayırınız.
 Hafif deterjanlı ılık suda temizleyiniz ve tüm parçaları ile birlikte iyice durulayınız.
 Yeniden Kullanmadan önce iyice kurumasını sağlayınız.
 Maske üzerinde çizik, çatlak varsa veya aşırı renk değişikliğine uğramış ise ,maskeyi yenileyiniz.

⚠ Uyarı

Klorine, alkol , çamaşır suyu ve aroma bazlı solüsyonları kullanıldığında ürünün ömrünü kısaltabilir.

Kullanılmaması Gereken Durumları

Bu maske aşağıda belirtilmiş hastalıkları olan hastalara için uygun olmayabilir :

- Kalp kapakları düzgün çalışmaması
- Aşırı Reflü
- Düzensiz öksürük refleksi ve Hiatal Hernia

Hasta tepkisiz, hareketsiz ise ve kendiliğinden maskeyi çıkartamıyorsa bu maskeyi kullanmayınız.

⚠ UYARILAR

Bu maske sadece doktorunuz tarafından önerilen CPAP sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.
 Maskeyi CPAP veya VPAP sistemi açıldığında ve düzgün çalıştığında kullanınız.
 Maskenin hava alma ve çıkış delikleri kapatmayınız.

Not: CPAP sistemleri , devamlı hava çıkışı sağlayan hava alma delikleri olan özel maskelerle kullanılmak için tasarlanmıştır. CPAP cihazı açıldığında ve düzgün çalıştığında cihazdan çıkan yeni hava maske içindeki nefes havası maskenin çıkış hava portuna iter. CPAP cihazı çalışmadığında,yeterli taze hava maskeye verilmeyecek ve nefesten çıkan havayı yeniden solunabilir.Birkaç dakikadan uzun bir sürede nefesten çıkan havayı solunursa bazen boğulma durumları meydana gelebilir.

*Eğer CPAP sistemi oksijen ünitesi ile kullanılıyorsa, CPAP cihazı kapatılınca oksijen akışı da kapatılmalıdır.

Not: Oksijen akışı açık ise ve CPAP cihazı çalışmıyorsa, oksijen cihazda birikebilir ve bir yangın tehlikesi oluşturulabilir.


Not: Belirli bir oksijen akış değerinde , solunan oksijenin konsantrasyonu, cihazın ayarlanmış basıncına, sızıntı oranına ve hastanın tepkilerine göre değişecektir.

Oksijen kullanıldığında sigara kullanmayınız ve ateş ile yaklaşmayınız.
 Nefes darlığı , göğüs ağrılığı , püskürtme veya aşırı baş ağrısı halinde doktorunuza başvurunuz.
 Uyurken kusma riskleri yok etmek için maskeyi yemekten 3 saat sonra kullanınız.
 Kusmayı yan etkisi taşıyan ilaçları kullanıyorsanız , maskeyi kullanmayınız.


Dikkat: Cihazı düşük basınçta çalıştırılıyorsa nefesten çıkan tüm gazları hortumdan çıkış portuna itilmesini yetersiz kalabilir ve bu gazları yeniden solunabilir.

*Maske sadece yetkili medikal personelden kullanım eğitimi ve talimatı almış olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.


Bağlama kemeri verilmiş ise aşağıdaki kurulum talimatları izleyiniz.

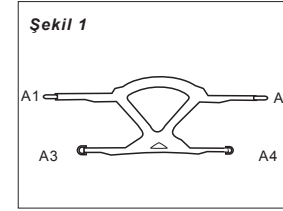


Bağlama kemerin velkro kısmını aşağıda olacak şekilde düz bir zemin üzerinde açınız.

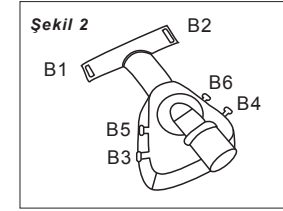


Maske üzerindeki kemer bağlama yerlerini tespit ediniz.

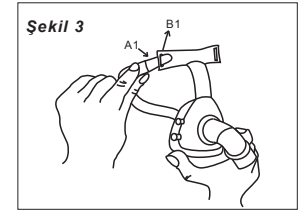


Şekilde gösterildiği gibi kemerin A1 ucunu maskenin üst bağlama yeri olan B1'den geçiriniz. Velkro yönlerine dikkat ediniz.

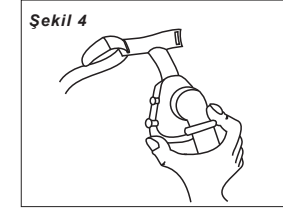


Velkroyu kapatınız.

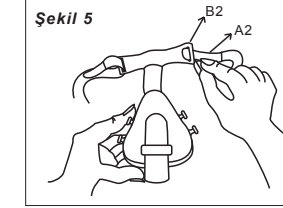


Şekilde gösterildiği gibi kemerin A2 ucunu maskenin üst bağlama yeri olan B2'den geçiriniz. Velkro yönlerine dikkat ediniz.

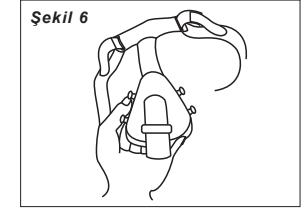


Velkroyu kapatınız.

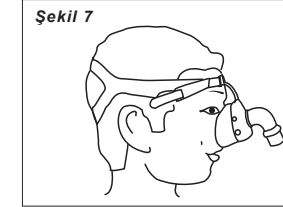

Bağlama kemeri yardımıyla maskeyi takınız.Üst bağlamaları maskeyi iyice yerleştiriniz.

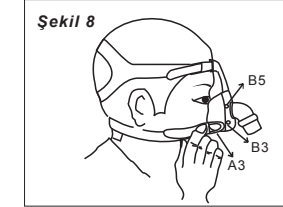


Şekilde gösterildiği gibi A3 plastik tokayı maskenin alt kısmına B3'e (veya B5) takınız.

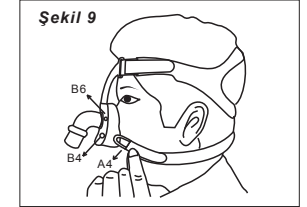


Şekilde gösterildiği gibi A4 plastik tokayı maskenin alt kısmına B4'e (veya B6) takınız.



Kemerin üst bağlamaları A1 & A2'yi düzelterek maskeyi konforlu pozisyona getiriniz.

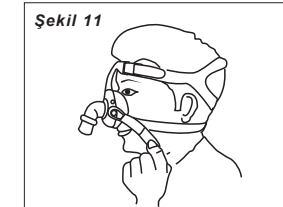

Kemerin alt bağlamaları A3 & A4'ü düzelterek maskeyi konforlu pozisyona getiriniz.

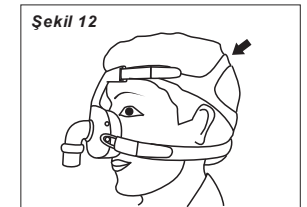

Şekilde gösterildiği gibi maske aşağıya kaymaması için başınızın üstünde bulunan kemeri iyi oturmasını sağlayınız.

*Maskeyi çıkartmak için alt tokaları çözünüz ve üst bağlamaları başınızdan çıkartınız.

*Yeniden kullanım için maskenin üst bağlamaları yerleştiriniz ve alt tokaları takınız.

*Ömrünün sonunda , maskeyi ülkenin mevzuatlarına uygun bir şekilde elden çıkartınız.



2460



COMPANIA EUROPEA DE PRODUCTOS MEDICOS, S.L.
 Villapark Business Park Av Quitapesares, 8
 Building 8 Villaviciosa de Odon (Madrid) 28670
 Spain, Ispanya



Acare Technology Co., Ltd

6F-3, No. 24, Wuquan 2nd Rd., Xinzhuang Dist.,
 New Taipei City, Taiwan, Tayvan

İthalatçı : Ece tıbbi cihazlar ve medikal san tic a.ş.
 ADRES : SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. THE İSTANBUL
 VELİEFENDİ SİT. G1 TİCARET APT.NO:57 AC ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
 Tel: 444 78 96