

KULLANIM KILAVUZU

Tekerlekli Sandalye

BME4611D




Kurulum ve Kullanım
Videosu İçin
For Installation and
Usage Video
Tarafınız.
Scan it.



KENDİNDEN MANEVRALI

1. TEKERLEKLİ SANDALYENİN PARÇALARI

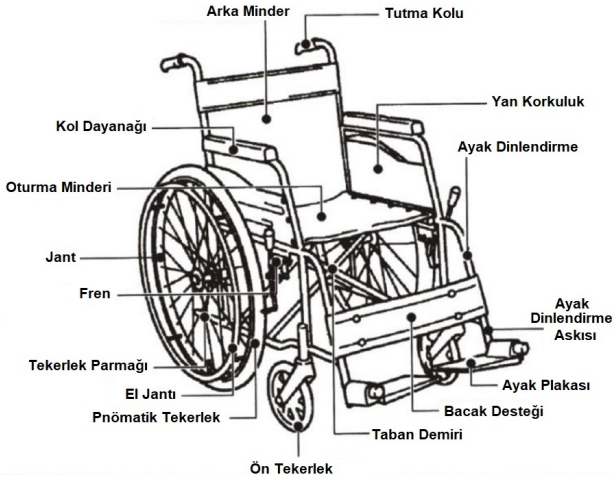

2. TEKERLEKLİ SANDALYE NASIL AÇILIR?


SABİT SIRTLIKLILIKLI



Gerekli
Aksesuarlar
1 pc Spanner



Kullanım Kılavuzu

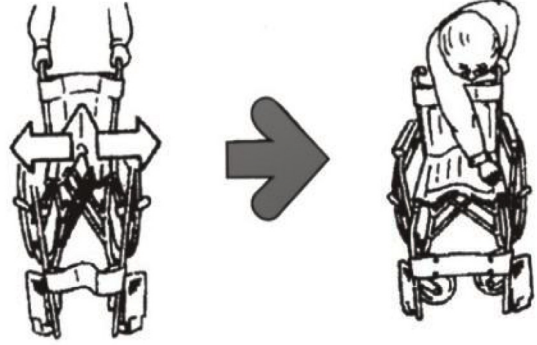

ADIM 1

Sandalyenin arkasında durun ve sandalyeyi açmak için dışa doğru çekin

ADIM 2

Sonra, koltuğa aşağı doğru bastırın ve açın.



Seat pipe




DİKKAT

Elinizi ya da parmağınızı, koltuk borusunun ya da koluğun altına sokmayın.


3. AYAK PLAKASI YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI

METOD 1

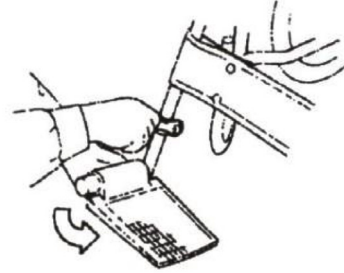

Ayak plakasını ok yönünde çevirin ve yüksekliğini ayarlayın. Daha sonra verilen anahtar ile kademeli borunun yan tarafındaki somunu sıkın.

METOD 2

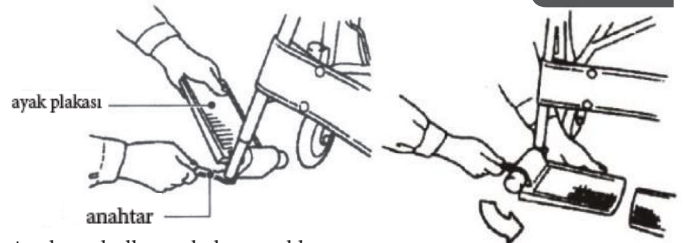


1. Anahtarı kullanarak basamaklı borunun ayak plakasına civatalı olduğu kısmını hafifçe gevşetin.


2. Ayak plakasını ok yönünde çevirin. Ardından ayak plakasını sabitleyin



DİKKAT

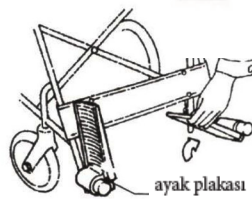

Ayak plakası

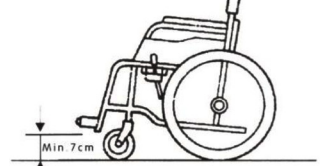


Min 7cm

Tekerlekli sandalyeye her bindiğinizde veya indiğinizde ayak plakasını yukarı çevirin.

Ayak plakasının yerden en az 7 cm yukarıda olduğundan emin olun. Çok düşük yerleştirilmesi, engelli zeminde seyahat ederken ayak plakası engellere çarparak tekerlekli sandalyenin dengesinin bozulmasına neden olur.

TEKERLEKLİ SANDALYENİN KATLANMASI

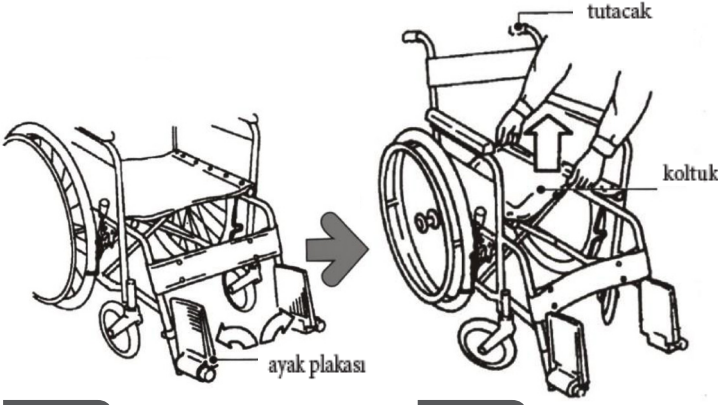



ADIM 1

Ayak plakasını okların yönünde yukarı çevirin.


ADIM 2

2. Tekerlekli sandalyeyi katlamak için koltuğun ortasını kaldırın.

3. Sandalyeyi herhangi bir ateş kaynağının yakınına koymayın, aksi halde koltuk arkılığı alev alarak yaralanmalara neden olabilir.

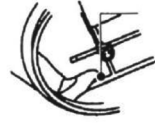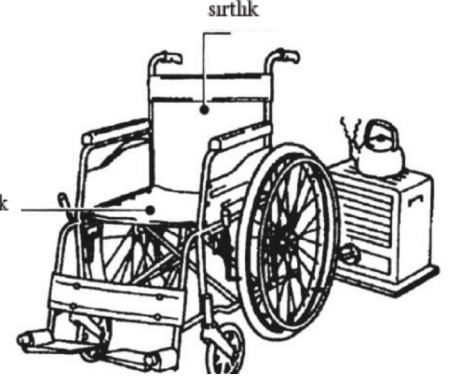

4. Yokuş yukarı veya aşağı hareket etmek için, tekerlekli sandalyeyi desteklemek üzere bir bakıcının yakınlarda olduğundan emin olun; aksi halde sandalye devrilebilir. Dik bir aşağı eğim için, tekerlekli sandalye yukarı bakacak şekilde döndürülmelidir. Ve bakıcı sandalyeyi kademeli olarak aşağı doğru geri almalıdır.

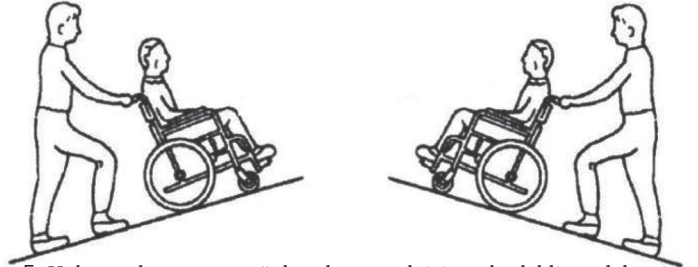

5. Yokuş yukarı veya aşağı hareket etmek için, tekerlekli sandalyeyi desteklemek üzere bir bakıcının yakınlarda olduğundan emin olun; aksi halde sandalye devrilebilir. Dik bir aşağı eğim için, tekerlekli sandalye yukarı bakacak şekilde döndürülmelidir. Ve bakıcı sandalyeyi kademeli olarak aşağı doğru geri almalıdır.


6. Tekerlekli sandalyeyi üzerinde hasta varken kaldırırken, koltuğun arkılığı katlanabilir türde ise kollardan tutmayın. Aksi takdirde koltuk arkılığı zarar görebilir.



⚠ DİKKAT

1. Kısa bir süre dururken bile frene basmayı unutmayın. Frene basmayı alışkanlık haline getirin.
2. Tekerlekli sandalye aniden duramaz, bu nedenle
4. üzerindeyken hız yapmayın.
5. 3. Keskin bir köşeyi dönerken devrilmeyi önlemek için hızı azaltın.
7. 4. Tekerlekli sandalyeyi hareket ettirmeden önce, hastanın
8. ayaklarının ayak plakası üzerinde olduğundan emin olun.
9. 5. Aktarmadan, tekerlekli sandalye ile asansörü kullanmadan
10. önce daima tekerlek kilitlerini devreye alın.
11. 6. Her zaman önce güvenliği sağlayın. Hasta yalnız kalmak
12. konusunda kendini güvensiz hissediyorsa, devam etmeden
13. önce yardım istemelidir.

6. TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

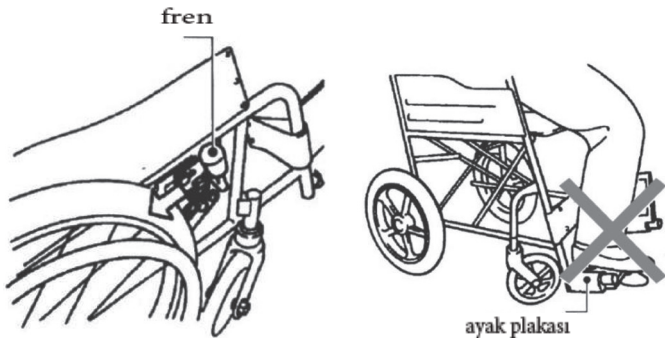

1. Tekerlekli sandalyeye binerken/inerken frenin kilitli olduğundan emin olun.

2. Tekerlekli sandalyeden inerken ayak plakasına basmayın, aksi halde sandalye öne doğru devrilir.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.
Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net Tel: 444 78 96