


**ROLATÖR**

**MODEL: RR-05**



**KULLANIM KILAVUZU**

## GÜVENLİK UYARISI !

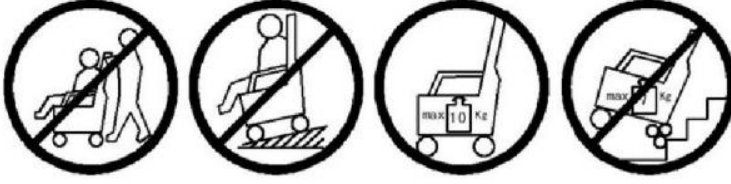

### Çevre Önlemleri:

- Lütfen bu arabayı rüzgarlı veya yağmurlu havalarda tek elle veya bir elinizde şemsiye tutarken kullanmayın.
- Kumlu veya çamurlu, özellikle çukurlu zeminlerde kullanmayınız.

### Kullanım Önlemleri:

- Aracı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- İnsanların yaralanmasını ve araca zarar gelmesini önlemek için bu ürün, trafiğin yoğun olduğu yollarda, kafa karıştırıcı bir kalabalığın olduğu halka açık yerlerde veya geceleri ışıkların bulunmadığı yollarda kullanıma uygun değildir.
- Araçlar, eğimli ve düz olmayan zeminlere oturmak için yerleştirilmemelidir.
- Yaşlılar veya çocuklar tarafından kullanılıyorsa, otururken aracı bir vasi denetlemelidir. Çocukların araç içinde oynamasına, bebeklerin ve küçük çocukların sepete veya koltuk paneline oturmasına izin verilmemelidir.
- Yaralanmaları önlemek için araç açıkken veya katlanmışken, bebeklerin veya çocukların yakınlarda olmasına izin vermeyin.
- Maksimum kullanım ağırlığı 80 kg'dır.
- Koltuk paneli dışında başka bir yere oturmak yasaktır.
- Lütfen koltuk panelini ayak dayanağı olarak kullanmayın.
- Park cihazı etkinleştirildiğinde arabayı itmeyin.
- Araçtan uzakta olduğunuzda park cihazını etkinleştirdiğinizden emin olun.
- Lütfen ön tekerlek kaldırılmış halde kullanmayın.
- Hasarı önlemek için lütfen eşyaları sepete yerleştirirken silindiri katlamayın. Katlarken ellerinizi sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Oturmadan önce, park cihazını etkinleştirdiğinizden, tekerlekleri frenlediğinizden ve koltuk panelini üzerine oturabileceğiniz şekilde düzleştirdiğinizden emin olun.

### Kullanım Sonrası Önlemleri:


- Tekerleklerin üzerindeki kiri mutlaka temizleyin.
- Çamuru veya tozu kuru bir bezle, cepleri yumuşak bir bezle silin.
- Tiner veya benzin gibi uçucu çözeltiler kullanmayın.
- Su lekelerini kuru bir bezle silin ve güneşte kurumaya bırakın.
- Uzun süre kullanılmadığında da temizleyin ve hava alan kuru bir yere koyun.
- Havanın çok soğuk veya sıcak olduğu zamanlarda, sandalyeyi dışarıda bırakmayın.
- Lütfen kullanım kılavuzunu araç gövdesiyle birlikte saklayın.
- Bu ürünü bir başkasına vermeniz gerekiyorsa kullanma kılavuzunu da mutlaka beraberinde verin.

- Uzun süre kullanmayacaksanız; güçlü güneş ışığı, yüksek sıcaklık ve yüksek neme maruz kalabilecek yerleri seçmekten kaçınınız. Bu sayede araç parçalarının eskimesini, renginin solmasını ve hasar görmesini önleyebilirsiniz.
- Lütfen bebeklerin veya çocukların kolayca erişebileceği yerlere koymayınız.
- Firmamızın sunduğu hizmetler dışında lütfen izinsiz sökmeyiniz, birleştirmeyiniz ve değişiklik yapmayınız.

#### **Kullanım Talimatları:**

Otomatik kilitleme cihazı ile donatılmış olmasına rağmen, kilitli olup olmadığını bir kez daha kontrol edin

**Not:** Kilit tamamen kapatılmazsa araç doğal olarak ileri ve geri hareket edecektir. Bu durumda kullanılması kesinlikle yasaktır.

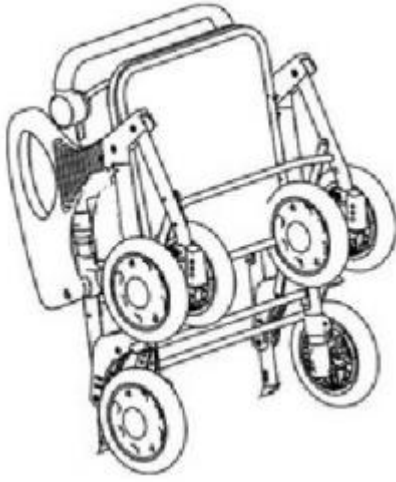

- Önce aracı ambalaj kutusundan çıkarınız
- Koltuk çerçevesini düzeltmek için koltuk panelinin ön ucunu ellerinizle ileri ve aşağı doğru bastırınız




### **Güvenlik uyarısı !**

Tekerlekli sandalyede otururken ağırlık merkezini koltuk paneline yerleştirdiğinizden emin olun. Orta konuma getirin ve aracı frenlemek için park düğmesine basın.

### **Fren nasıl kullanılır?**

1. Fren kolunu yukarı çekin ve el freni kolunu tutun; araç frenlenecektir. (Koltuk paneline oturmak istiyorsanız lütfen aracı durdurun)

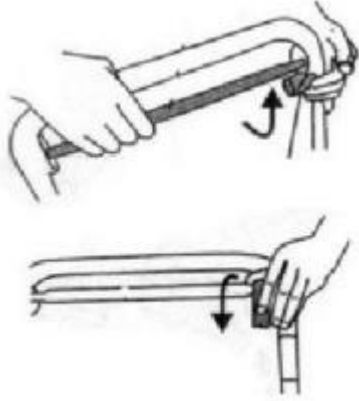


2. Fren tokası aşağı çekildiğinde araç insanlarla senkronize olarak yürüyecektir. Yürürken durmak veya bir engelle karşılaşmak isterseniz parmaklarınızla fren kolunu tutun ve aracı yukarı çekerek fren yapın.



### **Gidon kurulumu ve araç yükseklik ayarı**

- 1) Öncelikle aracın ana şasisini açın, gidon grubunu ön boruya yerleştirin (fren dişlisinin ileri olduğuna dikkat edin) ve ardından gidonu ve ön şasi borusunu kilitlemek için süngeri kullanın.
- 2) Aracın yüksekliğini ayarlamak için sol ve sağ süngü pimlerini çekerek ihtiyacınız olan vitesi ayarlayın. Daha sonra gidonu ve ön boruyu kilitlemek için süngeri takın. (Sol ve sağ yüksekliklerin tutarlı olması gerektiğini unutmayın)

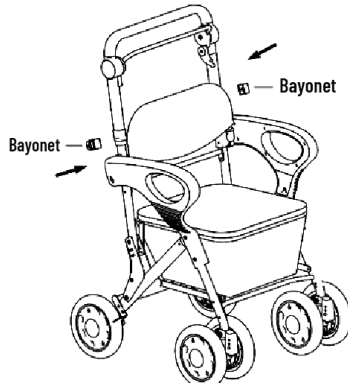

### **Tekerlek aksamının kurulumu ve kullanımı**

1) Aracın ön tekerlek aksamı çıkarılabilir ve direksiyon açıları 360 derece, 90 derece ve 0 derecedir (düz ileri).

Direksiyon kaydırma tokası aşağıya doğru itildiğinde 360 derece, ortada olduğunda ise 90 derece olup üst kısmı düzdür.

### **Fren ekipmanının ayarlanması**


El freni kolu çalışmıyorsa veya kolay çalışmıyorsa, fren donanımını kendiniz ayarlayın.

1) Araç fren dişlisini serbest çalışma durumuna ayarlayın

2) Ayar düğmesini ve sabitleme somununu elle sıkın, el freninin etkili olup olmadığını doğrulamak için ayar düğmesini birkaç kez saat yönünün tersine çevirin ve ardından sabitleme somununu saat yönünde sıkın.

### **Nasıl katlanır**

Sol ve sağ katlama düğmelerini yukarı çekin, ardından koltuk çerçevesini kaldırmak için kolu basılı tutun. Resimde gösterildiği gibi. Araç katlandıktan sonra ayağa kalkmak zor olabilir, bu nedenle devriliş kimsenin yaralanmasını önlemek için güvenli bir yere konulması gerekir.

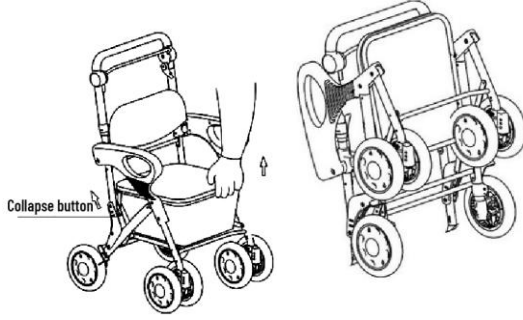

**ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.**

Cihangir mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1 Avcılar/ İSTANBUL

[www.respirox.com.tr](http://www.respirox.com.tr) / [www.ecemedikal.net](http://www.ecemedikal.net)

444 78 96

Yayın Tarihi: 18.03.2024