

ÇOCUK TEKERLEKLİ SANDALYESİ

Model: RCTS-02



KULLANIM KILAVUZU

Yayın Tarihi: 18.03.2024

1. Ürüne Genel Bakış


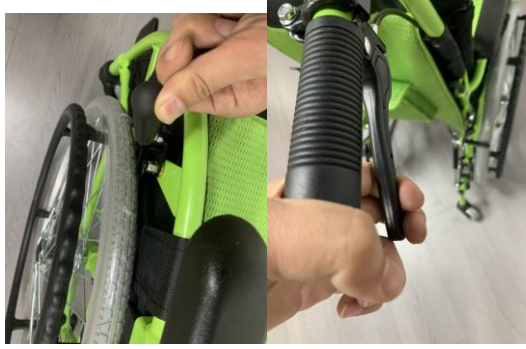

Bu tekerlekli sandalye, güvenli ve konforlu bir hareket sağlamak amacıyla çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kılavuz sayesinde tekerlekli sandalyenin ana fonksiyonları, çalıştırma yöntemleri, güvenlik önlemleri ve bakım yöntemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2. Ürün Özellikleri


1. Hafif ve katlanır tasarım sayesinde taşınması ve saklama kolaydır.
2. Yüksek mukavemetli malzemelerden yapıldığı için sağlam ve dayanıklıdır.
3. Sürüş güvenliğini sağlamak için fren sistemi ile donatılmıştır.
4. Koltuk minderleri ve sırtlık, konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.

3. Operasyon Rehberi

<p>1. Tekerlekli sandalyeyi açın: Size katlanmış şekilde teslim edilen tekerlekli sandalyeyi açın ve tüm parçaların sıkıca bağlandığından emin olun.</p>	<p>2. Tekerlekli sandalyenin katlanması: Pedalı yukarı doğru çevirin, koltuk minderinin her iki tarafındaki el kayışlarını iki elinizle tutun ve yukarı kaldırın. Tekerlekli sandalye artık katlanabilir durumdadır.</p>
	
<p>3. Koltuk minderini takın ve tekerlekli sandalyeye binin: Kalçanızı koltuk minderine yerleştirin, dengeyi ve konforunuzu sağlayacak şekilde sırtlık açısını ayarlayın.</p>	<p>4. Tekerlekli sandalyeyi çalıştırın: Kolçakları iki elinizle tutun, ayaklarınızı pedalların üzerine koyun ve tekerlekli sandalyeyi kuvvetle ileri doğru itin.</p>
<p>5. Ayak pedalı yükseklik ayar yöntemi: Cıvatayı gevşetmek için altıgen anahtar ve tork anahtarı kullanın, cıvatayı dışarı çekin, ayak pedalı delik mesafesini montaj konumuna ayarlayın ve ardından cıvatayı sıkın.</p>	<p>6. Fren kullanım talimatları:</p> <p>Not: Yokuş aşağı inerken tekerlekli sandalyeyi frenlemek için frenleri kullanmamaya dikkat edin, aksi takdirde devrilme riski olacaktır.</p>

	
<p>7. Emniyet kemeri kullanım talimatları:</p> <p>Emniyet kemerini kullanmak için önce emniyet kemeri tokasını açın. Kullanıcı araca bindikten sonra emniyet kemeri uzunluğunu uygun şekilde ayarlayın ve tokayı kilitleyin.</p>	

4. Çalışma Koşulları:

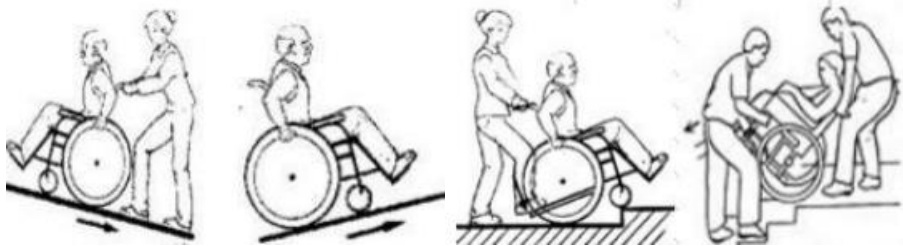

1. Tekerlekli sandalyeyi düz bir yolda veya iç mekanlarda kullanmanızı tavsiye ederiz.

Tekerlekli sandalyeyi kötü hava koşullarında ve açık havada kullanmaktan kaçının. Eğer kötü hava koşullarından kaçınılamıyorsa, tekerlekli sandalye kullanıldıktan sonra kullanıma uygun korunaklı bir yer bulmanızı tavsiye ederiz.

2. Çamurlu, karlı, kumlu, çakıllı, çukurlu ve engebeli yollar vb. kötü yollarda araç kullanmaktan kaçının. Lastiğin daha hızlı yaşlanmasını önlemek için kavurucu güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçının.

3. Yüksek basamaklardan geçmekten kaçının. Karşıya geçmeniz gerekiyorsa, bu işlem bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

8. Tekerlekli sandalye kullanılmayacaksa, serin ve kuru bir yerde saklamanız ve üzerine uzun süre ağır nesnelere koymamanız önerilir.

9. Tekerlekli sandalyeler için en uygun ortam normal sıcaklık ve nemde depolama ve kullanımdır.

5. Güvenlik Önlemleri

1. Lütfen kullanmadan önce tekerlekli sandalyenin tüm parçalarının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa, lütfen zamanında onarın.

2. Lütfen tekerlekli sandalye kullanırken dengenizi koruyun ve ani dönüşlerden veya ani frenlerden kaçın.

3. Lütfen rampalarda, merdivenlerde ve diğer karmaşık arazilerde dikkatli sürün ve gerektiğinde yardım isteyin.

4. Tekerlekli sandalyeye zarar vermemek veya kullanım güvenliğini etkilememek için lütfen aşırı yüklemeyin.

5. Acil durumlarda, lütfen profesyonel bakım personeline başvurun veya zamanında başkalarından yardım isteyin.

6. Bakım

1. Lekeleri ve çizikleri önlemek için tekerlekli sandalyenin yüzeyini düzenli olarak temizleyin;

2. Tekerlekli sandalyenin her bir bileşeninin bağlantılarının sıkı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir gevşeklik varsa, lütfen zamanında sıkın.

3. Cilt enfeksiyonunu önlemek için koltuk minderleri ve arkalıklar temiz tutulmalıdır;

4. Tekerlekli sandalyenin hasarlı veya arızalı olduğu tespit edilirse, zamanında onarım için profesyonel bakım personeli ile iletişime geçilmelidir.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Cihangir mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1 Avcılar/ İSTANBUL

www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net

Tel : 444 78 96