



RespiroX ®

TEKERLEKLİ SANDALYE HASTA TRANSFER ARACI

MODEL: RTS-03



OTURMA YÜKSEKLİĞİ
49cm



SIRT YÜKSEKLİĞİ
34cm



TEKERLEK BOYUTU
6"/8"



KATLANABİLİR
25cm



NET AĞIRLIK
6.5KG



TASIMA KAPASİTESİ
120KG

CE



1. Tekerlekli Sandalyenin Katlanma İşlemi:

- ① Öncelikle her iki yandaki katlama kilidini açınız (bkz. Şekil 1).
- ② Daha sonra, ayak dayanağını yukarı kaldırınız ve oturma minderi yakınına yerleştiriniz (bkz. Şekil 2).
- ③ Kol dayanaklarını geriye doğru katlayınız ve istenilen yöne doğru 270 derece döndürünüz (bkz. Şekil 3). İşlem tamamlanmıştır.



2. Tekerlekli Sandalyeyi Açma İşlemi:

① Sol elinizle oturma minderi destek çerçevesini, sağ elinizle sırt dayanağı destek çerçevesini tutunuz (bkz. Şekil 6).

Her iki elinizi de yavaşça dışa doğru açınız ve güvenlik mandalını sabitleyiniz (bkz. Şekil 7).




3. Birleşik Fren Sistemi:

- ① Birleşik frenin işlevi şu şekildedir: Fren yapmak için önce sırt dayanağındaki büyük fren kolunu kavrayınız, ardından kuvvetlice yukarı doğru bastırınız (bir “çıt” sesi duyacaksınız) ve fren uygulanmış olacaktır. (bkz. Şekil 8)
- ② Fren tamamen uygulandıktan sonra, küçük kolu çekiniz (bir “çıt” sesi duyacaksınız) ve böylece fren serbest kalır, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirebilirsiniz. (bkz. Şekil 9)



Şekil 8

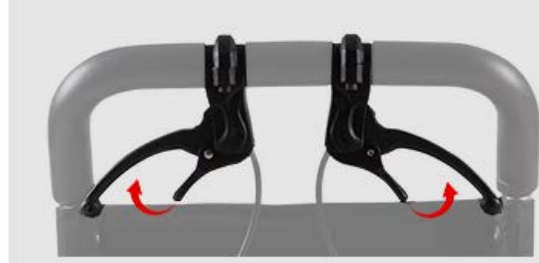

Şekil 9

UYARI!

Lütfen küçük çocukların veya kullanım işlemlerini anlayamayacak kişilerin tekerlekli sandalyeyi kullanmalarına izin vermeyiniz.

- 1) Güvenliđi sađlamak için, kullanıcıların tekerlekli sandalyeyi kullanmadan önce mutlaka stabilitesini dikkatlice test etmeleri tavsiye edilir.
- 2) Tekerlekli sandalyeyi katlarken veya açarken, çerçevenin her iki yanına veya tutma kollarına baskı uygulamayınız. Yanlış katlama veya açma işlemi kolayca hasara yol açabilir.
- 3) Tekerlekli sandalyeyi merdivenlerden yukarı çıkarmak için ivmeye güvenmeyiniz. Bu durum kazalara veya sandalyenin zarar görmesine sebep olabilir.
- 4) Merdivenleri veya basamakları yardımsız olarak çıkmayınız veya inmeyiniz. Merdivenden çıkarken veya inerken, refakatçiler kişinin tekerlekli sandalye ile birlikte hareket etmesine izin vermemelidir; aksi halde bu durum hem kişiye risk oluşturabilir hem de sandalyeye zarar verebilir.
- 5) Araca binerken veya inerken ayak dayanağına basmayınız. Öncelikle ayak dayanağını katlamanız veya yana çevirmeniz gerekmektedir. Kullanım sırasında da ayak dayanağına basılmamalıdır; aksi takdirde tekerlekli sandalyenin devrilme riski vardır.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN.TİC. A.Ş

Cihangir mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1 Avcılar/ İstanbul/ Türkiye
Tel: 444 78 96 www.ecemedikal.net / www.respirox.com.tr

Yayın Tarihi: 01/10/2025